

neodisher® SBK

Specjalny kwaśny produkt płuczący do myjni naczyń sanitarnych – płynny koncentrat



Zastosowanie:

Płukanie oraz wiązanie twardości wody w myjniach naczyń sanitarnych z dezynfekcją parową basenów, kaczek, butelek na mocz oraz misek w szpitalach i domach pomocy społecznej.

Właściwości:

neodisher SBK jest lekko kwaśnym środkiem płuczącym ze specjalnymi składnikami zmiękczającymi. Dzięki dobrym właściwościom wiązania wapnia i nawilżania nie pozostawia plam wodnych i osadów wapiennych na przedmiotach oraz wytwornicach pary i przewodach.

Przy zalecanym stosowaniu, zabezpiecza przed tworzeniem się kamienia kotłowego w generatorze pary oraz w układzie rur myjni.

neodisher SBK jest odpowiedni do wody o każdym stopniu twardości.

Dozowanie:

W myjniach naczyń sanitarnych: 0,5 – 1,5 ml/l w zależności od twardości wody poprzez odpowiednie urządzenie dozujące. Należy zwracać uwagę na kwasową odporność systemów dozujących i generatora pary.

Do usuwania uporczywych zabrudzeń zalecane jest stosowanie neodisher SBR extra – specjalny środek myjący do myjni naczyń sanitarnych.

Nie mieszać z innymi produktami.

Układ dozowania płukać wodą przed zmianą produktu.

Należy przestrzegać zaleceń producentów myjni.

Dane techniczne:

Gęstość (20°C):

1,1 g/cm³

Wartość pH (20°C w wodzie zdemineralizowanej):

0,5 – 1,5 ml/l: 3,7 – 3,0

Lepkość (koncentrat, 20°C):

<50 mPas

Składniki:

Składniki według Rozporządzenia WE 648/2004 dot. detergentów:

<5% polikarboksylany, środki konserwujące(metylochlooroisotiazolinon/metylisotiazolinon).


Klasyfikacja:



neodisher SBK spełnia wymagania dot. wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą 93/42/EC. Wyłącznie do zastosowań przemysłowych.

Magazynowanie:

Magazynować w temperaturach 0 – 30°C.

Okres trwałości 3 lata od daty produkcji. Data ważności produktu podana jest na etykiecie za symbolem .

Rodzaj zagrożenia i zasady prawidłowego postępowania:

Zgodnie z Dyrektywą o substancjach i preparatach chemicznych 1999/45/EC dla koncentratu: produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Dalsze informacje o produkcie znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.drweigert.pl / zakładka „Pliki”.

1.2010 / 18.08.2010



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Francuska 18, 03-906 Warszawa

Telefon: +4822 616 02 23
Faks: +4822 617 81 21

e-mail: office_pl@drweigert.com
Internet: www.drweigert.pl

Powyższa informacja, która jest odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa, ale nie pociąga za sobą obietnicy jakościowej oraz innych właściwości.